

Modellierpasten LP/ H und LP/ W

Hersteller: HEBA-OTOPLASTIK Labortechnik + Einrichtungen GmbH & Co. KG
Hauptstr. 42 D-63853 Mömlingen
Tel. +49 6022 / 681 600 Fax: +49 6022 / 31663 Email: info@heba.de



Allgemeine Produktinformation;

Modellierpaste ist für Reparaturen als auch zur Herstellung von IO-Schalen geeignet.

Liefereinheiten:

Modellierpaste LP/H klar	20 g Tube	Art.-Nr. 45901
Modellierpaste LP/H beige	20 g Tube	Art.-Nr. 46100
Modellierpaste LP/H flesh	20 g Tube	Art.-Nr. 46210
Modellierpaste LP/H rot	20 g Tube	Art.-Nr. 46220
Modellierpaste LP/H blau	20 g Tube	Art.-Nr. 46225
Modellierpaste LP/W klar	20 g Tube	Art.-Nr. 46000
Modellierpaste LP/W beige	20 g Tube	Art.-Nr. 46200

Besondere Hinweise:

- Pinsel immer nur für dasselbe Material verwenden
- Pinsel im Oberflächenreiniger säubern

Besondere Lagerhinweise:

Nicht im Kühlschrank aufbewahren.

Verarbeitungsanleitung

Material direkt aus der Tube oder mit Hilfe eines Spatels (Pinsels) auftragen.

4 – 6 Minuten je nach Dicke im Lichtgerät polymerisieren
mit klarem Wasser abspülen und trocknen evtl. nacharbeiten, dann lackieren (siehe Nr. 1001)



04.11.04